
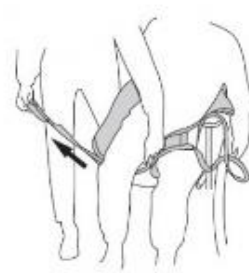


راهنمای گذاشتن بیمار روی ویلچیر یا صندلی

هنگام قرار دادن یک بیمار در ویلچیر یا صندلی، اطمینان حاصل کنید که او به اندازه کافی به پشتی ویلچیر یا صندلی نزدیک شده است. برای تسهیل قرار دادن در صندلی یا ویلچیر به کمک شخصی پشتی صندلی را به سمت عقب بکشید طوری که پایه های جلوی صندلی یا چرخهای جلوی ویلچیر از زمین جدا بشوند. اجازه دهید اینکار را با قرار دادن پای خود بر روی بازوی یا زیر ویلچیر انجام دهید. موقع پایین آوردن ویلچیر روی صندلی از قسمت زانو بیمار فشار دهید به طوری که بیمار در جهت پشت صندلی هدایت شود. بعد به آرامی بیمار را در روی ویلچیر قرار دهید. بهترین ترین راه این است که بعد از گذاشتن بیمار روی ویلچیر در صورت نداشتن اعتراض وی جلیقه را از زیر بیمار در نیارید تا در استفاده بعدی راحت باشید فقط گوشه های جلیقه را از زیر ران بیمار به بیرون بکشید و در گوشه ای از ویلچیر ثابت کنید تا هنگام حرکت به چرخ ویلچیر برخورد نکند.

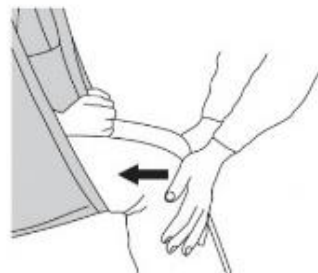

توجه:

بلند کردن و انتقال بیمار همیشه یک درجه خطر دارد. بنابراین کاربر گرامی راهنما و دستورالعمل ها را با دقت مرور کنید. درک کامل از محتویات دستورالعمل ها بسیار ضروری است. فقط افراد آموزش دیده باید از تجهیزات بالابر استفاده کنند. در ضمن اطمینان حاصل کنید که لوازم جانبی بالابر مناسب برای نوع کاربری شما هستند و برای وضعیت بلند کردن مناسب هست. هنگام استفاده از تجهیزات بالابر و لوازم جانبی مراقب باشید به عنوان یک مراقب، شما مسئول ایمنی بیمار می باشید. شما باید از وضعیت بیمار و توانایی های وی آگاه باشید. همچنین قبل از هر کار جلیقه را بررسی کنید. و قبل از استفاده جلیقه را به لحاظ آسیب به درز، مواد / پارچه، بند و حلقه بند، به دقت بررسی کنید. هرگز از لوازم جانبی آسیب دیده استفاده نکنید. در صورت بروز ابهام، با سازنده یا فروشنده تماس بگیرید.